

# Anleitung Gratis-Antigentest

Liebes Mitglied!

Die Anleitung/Beschreibung für die Gratis-Antigentests aus den Apotheken ist teilweise unleserlich und daher unbrauchbar.

Nach Abklärung der Seniorenbund-Bundesleitung mit dem Gesundheitsministerium wurde uns zumindest eine les- und verwendbare Anleitung übermittelt, welche wir euch nachstehend gerne zur Verfügung stellen.

## Anwendung für das Testkit der Firma Clungene

### Lagerung

Den versiegelten Beutel bei einer Temperatur von 4-30 °C lagern. Das Kit ist innerhalb des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums zu verwenden.

Nach dem Öffnen des Beutels sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden. Längerer Kontakt mit heißer und feuchter Umgebung führt zu einer Verschlechterung des Produkts.

### Anwendung

- 1.) Tupfer aus der Verpackung nehmen, Kopf nach hinten neigen, Tupfer ins Nasenloch einführen bis Widerstand zu spüren ist, einige Sekunden rollen und reiben, langsam drehend entfernen.
- 2.) Plastikröhrchen mit Extraktionsflüssigkeit öffnen, Tupfer fest gegen den Boden und die Seiten des Röhrchens drücken, Tupfer 1 Minute im Röhrchen lassen.
- 3.) Die Seiten des Röhrchens zusammendrücken beim Entfernen des Tupfers um die Flüssigkeit zu extrahieren.
- 4.) Röhrchen mit beigelegter Tropfspritze abdecken, Nachweiskit aus dem versiegeltem Beutel nehmen, Röhrchen umdrehen und aufrecht 3 Tropfen auf die Probenvertiefung geben.
- 5.) Nach 15 Minuten kann das Ergebnis abgelesen werden. Die Ergebnisse nicht nach mehr als 20 Minuten ablesen.

### Ergebnis

#### **Negativ:**

Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich (C) und keine Linie erscheint im Testbereich (T).

#### **Positiv:**

Es erscheinen zwei Linien. Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich (C) und eine andere farbige Linie erscheint im Testbereich (T), unabhängig von der Stärke der Testlinie.

#### **Ungültig:**

Die Kontrolllinie wird nicht angezeigt.

Unzureichendes Probenvolumen oder falsche Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Versagen der Kontrolllinie. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Nachweiskit. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie die Verwendung der Charge sofort und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Quelle:

<https://shop.ossenberg.com/Produkt/clungene-covid-19-antigen-schnelltest-25er-box/>